

Guía rápida de CEFALY

Lea el manual del usuario de CEFALY para conocer las instrucciones detalladas antes de usar el dispositivo.

Configuración y uso



- 1) Cargue por completo el dispositivo al recibirlo con el adaptador y el cable proporcionados. Una vez enchufado, la luz verde comenzará a titilar. Cuando esté totalmente cargado (~ 3 horas), la luz verde quedará encendida, pero sin titilar.



- 2) Lávese la frente (entre y sobre las cejas) con agua y jabón, y seque bien la zona antes de CADA sesión.



- 3) Abra el paquete de electrodos reutilizables, retire el recubrimiento de plástico y separe suavemente el electrodo del recubrimiento. Conserve el paquete y el recubrimiento para luego guardar y reutilizar el electrodo.



- 4) Con la ayuda de un espejo, coloque el electrodo de modo tal que su base quede entre las cejas y las alas del electrodo queden sobre las cejas. Una vez que el electrodo esté bien ubicado, use los dedos para asegurarse de que quede bien plano y firme contra la piel.





- 5) Acerque el dispositivo a su frente con los imanes de la parte de atrás del dispositivo apuntando hacia la zona de contacto magnética en la parte frontal del electrodo. El dispositivo se adherirá solo al electrodo y se ubicará en el lugar apropiado. Una vez colocado, seleccione e inicie el programa de tratamiento deseado.

El dispositivo se apagará automáticamente al final de la sesión de tratamiento. Quite el dispositivo separándolo del electrodo. Luego, despegue el electrodo de la frente y colóquelo nuevamente en el recubrimiento de plástico. Coloque el recubrimiento nuevamente en el paquete y guárdelo en una bolsa de plástico con cierre hermético.

✓ INDICACIONES – CEFALY está indicado para los siguientes usos:

- Tratamiento agudo de migrañas con o sin aura en pacientes de 18 años o más.
- Tratamiento preventivo de migrañas episódicas en pacientes de 18 años o más.

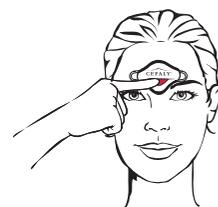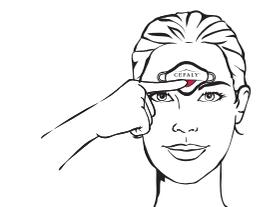

Consejos para el éxito del tratamiento

Use el programa de tratamiento AGUDO al inicio de una migraña.

- Programa de 60 minutos diseñado para tratar los ataques de migraña rápidamente.
- Para activar el programa de tratamiento AGUDO, presione el botón del dispositivo una vez.
- Un solo pitido indica que se ha seleccionado el programa de tratamiento AGUDO.
- Después de unos segundos, la luz del dispositivo titilará continuamente una vez hasta que termine la sesión.
- Use el programa de tratamiento AGUDO durante su ciclo completo de 60 minutos.

Use el programa PREVENTIVO durante períodos sin migrañas.

- Programa de 20 minutos diseñado para el tratamiento preventivo de las migrañas.
- Para activar el programa PREVENTIVO, presione el botón del dispositivo dos veces.
- Dos pitidos indicarán que se seleccionó el programa PREVENTIVO.
- Después de unos segundos, la luz del dispositivo titilará continuamente dos veces hasta que termine la sesión.
- El uso diario apropiado del programa PREVENTIVO puede reducir la cantidad de días de migraña.

Puntos importantes

- Si siente molestia durante los primeros 14 minutos a medida que la intensidad aumente, presione de inmediato el botón del dispositivo una vez (un pitido) para estabilizar la intensidad durante el resto del programa.
- Se recomienda aumentar la intensidad del programa gradualmente durante el transcurso de varios días y varias sesiones de tratamiento para alcanzar el máximo nivel tolerable de tratamiento.
- La intensidad también puede controlarse manualmente. Después de 10 segundos del inicio del programa, presione y mantenga apretado el botón del dispositivo hasta alcanzar el nivel de intensidad deseado (pitidos rápidos). La intensidad máxima se alcanzará después de mantener apretado el botón del dispositivo durante aproximadamente 30 segundos (o hasta que los pitidos se detengan).
- Para frenar o interrumpir las sesiones de tratamiento por algún motivo, separe el dispositivo del electrodo. (El dispositivo emitirá una serie de pitidos sucesivos que indicarán que la sesión se interrumpió).
- Quizás se requieran unas semanas de uso continuo y apropiado para alcanzar una mejoría evidente.

✗ CONTRAINDICACIONES – NO USE CEFALY SI:

- Tiene dispositivos metálicos o electrónicos implantados en la cabeza.
- Tiene un dolor de origen desconocido.
- Tiene un marcapasos cardíaco o un desfibrilador externo o implantado. Esto puede causar interferencias con el marcapasos, una descarga eléctrica o la muerte.

¿Necesita asistencia?

www.cefaly.com | Email: cs@cefaly.com

Línea gratuita: 1-844-475-7100, L. - V., 9 a.m. - 5 p.m. ET

CEFALY
TECHNOLOGY

Si desea información acerca de las indicaciones de uso, las advertencias y las contraindicaciones de CEFALY, consulte el manual del usuario o comuníquese con CEFALY.